


Vejledning til montering af beskyttelsesvisir

Trin 1: Fjern den beskyttende film fra begge sider af visiret.




Trin 5: Klem visiret fast i midten af stellet.

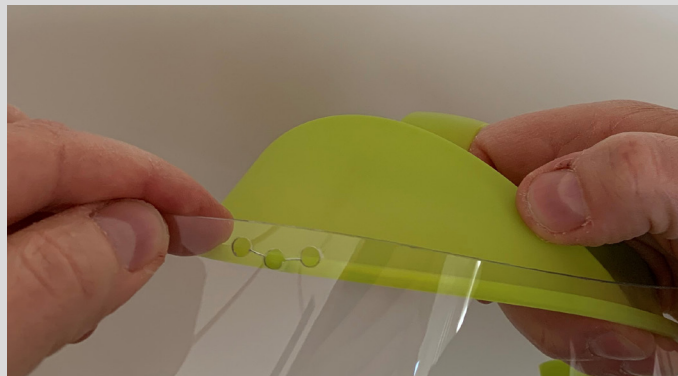


Trin 2: Klem visiret fast i stallets ene side.



Trin 6: Spænd en elastisk mellem krogene på bagsiden af stellet.

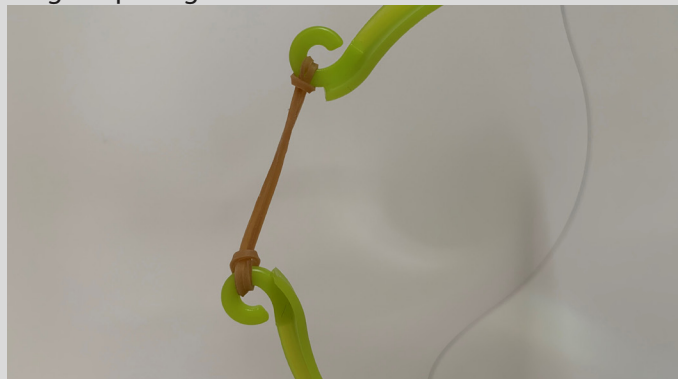

Trin 3: Vend stellet rundt.

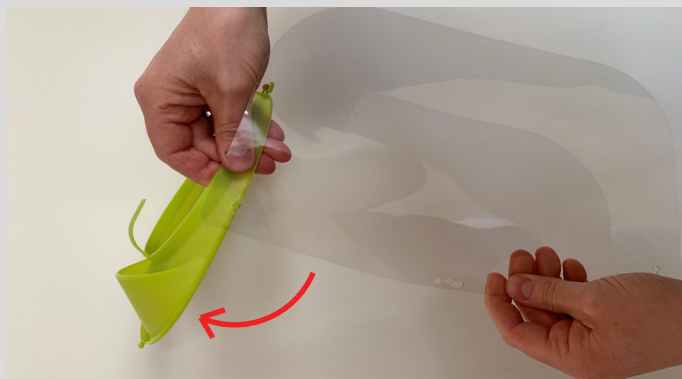

Beskyttelsesvisiret er klar til brug.

Trin 4: Klem visiret fast i stallets modsatte side. Juster visirets vinkel ved brug af de 3 huller i hver side af visiret.

